

Tensiomètre manopoire avec 4 brassards

55,00 € HT

Référence : CM22.600.12



Description

Pack Tensiomètre manopoire avec 4 brassards (Obèse Adulte Enfant Nourrisson)

Le tensiomètre manuel manopoire est un dispositif permettant de mesurer la pression exercée par le sang dans les artères d'un patient. Il est utilisé en auscultation, associé à un stéthoscope.

Le pack complet (tensiomètre anéroïde manopoire, associé à 4 brassards de taille différentes) permet une polyvalence de la prise en charge quelque soit le patient et sa morphologie, suivant la circonférence de son bras..

Polyvalence :

Le tensiomètre anéroïde manopoire est doté de brassards de tailles différentes, permettant de s'adapter à toute morphologie :

- Brassard nourrisson : circonférence de brassard 13 - 19 cm
- Brassard enfant : circonférence de brassard 18,4 - 26,2 cm
- Brassard adulte : circonférence de brassard 25,4 - 40,6 cm
- Brassard obèse : circonférence de brassard 33,3 - 51 cm

Utilisation aisée :

La mesure s'effectue à hauteur du cœur pour le brassard et ceci pendant toute la durée de la mesure. Fermer la mollette, dans le sens des aiguilles d'une montre, près de la poire, et commencer à gonfler le brassard. Décompresser le brassard en ouvrant lentement la mollette (pas plus de 2 à 3 mmHg), dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Mesurer la pression artérielle. Dès la fin de la séquence, ouvrir complètement la mollette pour évacuer tout l'air encore dans la poche du brassard. Retirer le brassard. Dans le cas d'une nouvelle prise de tension, attendre environ 2 minutes entre les prises.

Ne jamais gonfler le brassard au delà de 300 mmHg

Nettoyage facilité :

Procéder au nettoyage à l'aide d'un tissu doux et sec, ou une avec une solution désinfectante diluée. Ne pas immerger le manomètre.

Pour le brassard, retirer la poche en caoutchouc avant de nettoyer le brassard en machine à 30°C ou à la main, ne pas essorer.

La poche ainsi que la tubulure peuvent être nettoyés à l'eau tiède savonneuse : boucher l'extrémité du tube avant toute opération pour éviter le remplissage de la poche par du liquide. Rincer et sécher

Vérification périodique :

L'appareil doit être soumis à un contrôle technique au minimum tous les 2 ans, et après chaque réparation. Ces contrôles sont réglementaires suivant la Directive 93/42/CE, modifié par la 2007/47/CE sur les Dispositifs Médicaux. Merci de nous contacter pour connaître les organismes agréés pour ces contrôles.

Veiller prêter attention au cadran, pour ne pas l'endommager et ne pas exposer les brassards aux radiations solaires.

Caractéristiques techniques :

Tensiomètre type manopoire anéroïde avec cuillère

Brassards : 4 tailles différentes (nourrisson, enfant , adulte et obèse)

Mode : Auscultatoire

Plage de mesure : 0 - 300 mmHg

Précision : +/- 3 mmHg

Échelon : 2 mmHg

Vitesse de décompression : 2 à 3 mmHg/sec

Température d'utilisation : +10 à + 40° C

Température de stockage : -20 à +40°C , à 85% d'humidité

Plage de tolérance : +/- 3 mmHg

Poids du pack : 930 gr

Garantie : 1 an

Dispositif médical de Class I Mesure

Marquage CE0123

Conforme à la directive 93/42/CE